

Kurzanleitung

Version: 4

gültig ab: 18.06.2024

Revision: 18.06.2025

Institut für Klinische Chemie und Klinische Pharmakologie
-Zentrallabor-

ZL07_KA_Info PTH rapid

Seite 1 von 1

Intranet

Analyt PTH rapid intaktes Parathormon (nur für intraoperative Zwecke)

- Bitte die Durchführung des PTH rapid im Zentrallabor anmelden (telefonisch 12130, 12131 oder per mail <u>Anke.Carstensen@ukb.uni-bonn.de</u> oder <u>Martina.Schmidt@ukb.uni-bonn.de</u>).
 Wir benötigen folgende Angaben: Patientendaten, OP Termin, Telefonnummer des OP Saals zur schnellen Befundübermittlung.
- 2. Abnahme unmittelbar vor OP, eine Monovette Lithium Heparin- Plasma orange, Laborauftrag für PTH anlegen. Der Transport dieser Probe wird von der Station angefordert (elektronisch, Notfallprobe, bekanntes Procedere) Die Probe bitte separat verpacken, nicht mit anderen Proben in einen Transportbeutel geben, zusätzliche Beschriftung des Transportbeutels "PTH rapid" mit Filzstift.
- 3. intra OP Proben, Abnahme Monovette Lithium Heparin- Plasma orange, Laborauftrag für PTH anlegen. Der Transport dieser Proben wird vom OP angefordert. Bitte als Transportart "Laborprobe Notfall dringend" und unter Dringlichkeit " JIT" auswählen eingeben. Zusätzlich bitte im Bemerkungsfeld "PTH Schnelltest" eingeben.



Gedruckt: 06.11.2024 13:10:04, Birgit Stoffel-Wagner